



Alfresa H1N1 Kit

インフルエンザ A ウイルス (AH1 pdm) 検出用

- 豚由来H1N1を特異的に検出できます。
- イムノクロマト法で操作は簡便です。
- クリアーなラインで判定が容易です。

1. 本品は研究用試薬であり、診断には使用できません。
2. 保険適用されていませんので、保険請求できません。

使用目的

- 鼻腔ぬぐい液中のインフルエンザ A ウイルス (AH1pdm) の検出

データ

● 分離株データ

	株	亜型	結果
1	A/Suita/01/2009	Novel Flu (H1N1)	++
2	A/Brisbane/59/2007	H1N1	-
3	A/New Caledonia/20/90	H1N1	-
4	A/New Jersey/8/76	H1N1	-
5	A/Sw/Hokkaido/2/81	H1N1 (classical swine)	+
6	A/Texas	H3N2	-
7	A/Panama	H3N2	-
8	A/Shangdong	H3N2	-

● 臨床検体データ (2009/2010 シーズン)

		PCR			
		AH1pdm	陰性	B 型	計
本品	陽性	40	1	0	41
	陰性	6	10	3	19
	計	46	11	3	60

感度：87.0% (40/46) 特異度：92.9% (13/14) 全体一致率：88.3% (53/60)

● 臨床分離株データ

検体	株数	結果
季節性 H1N1	10	すべて陰性
新型 H1N1	10	すべて陽性

臨床検体データ、臨床分離株データは
原土井病院 池松秀之先生監修

判定写真



キットの構成

- テストプレート：10 枚
- 検体抽出液：10 本
- 付属品 ノズル (フィルター付き)：10 個

貯蔵方法・有効期間

- 貯蔵方法：5～30℃で保存
- 有効期間：6箇月 (使用期限は外装に記載されています。)

操作方法、使用上又は取扱い上の注意等は説明書をご参照下さい。